


マニュアルがいらないくらいわかりやすい 操作は一画面でかんたん！

文書入力・リモコン・メール送信が1つの画面で操作可能です。漢字、カタカナがサブメニューに表示されるので、文字盤の切り替えが不要。文書作成中にテレビチャンネルを切り替えることができます。

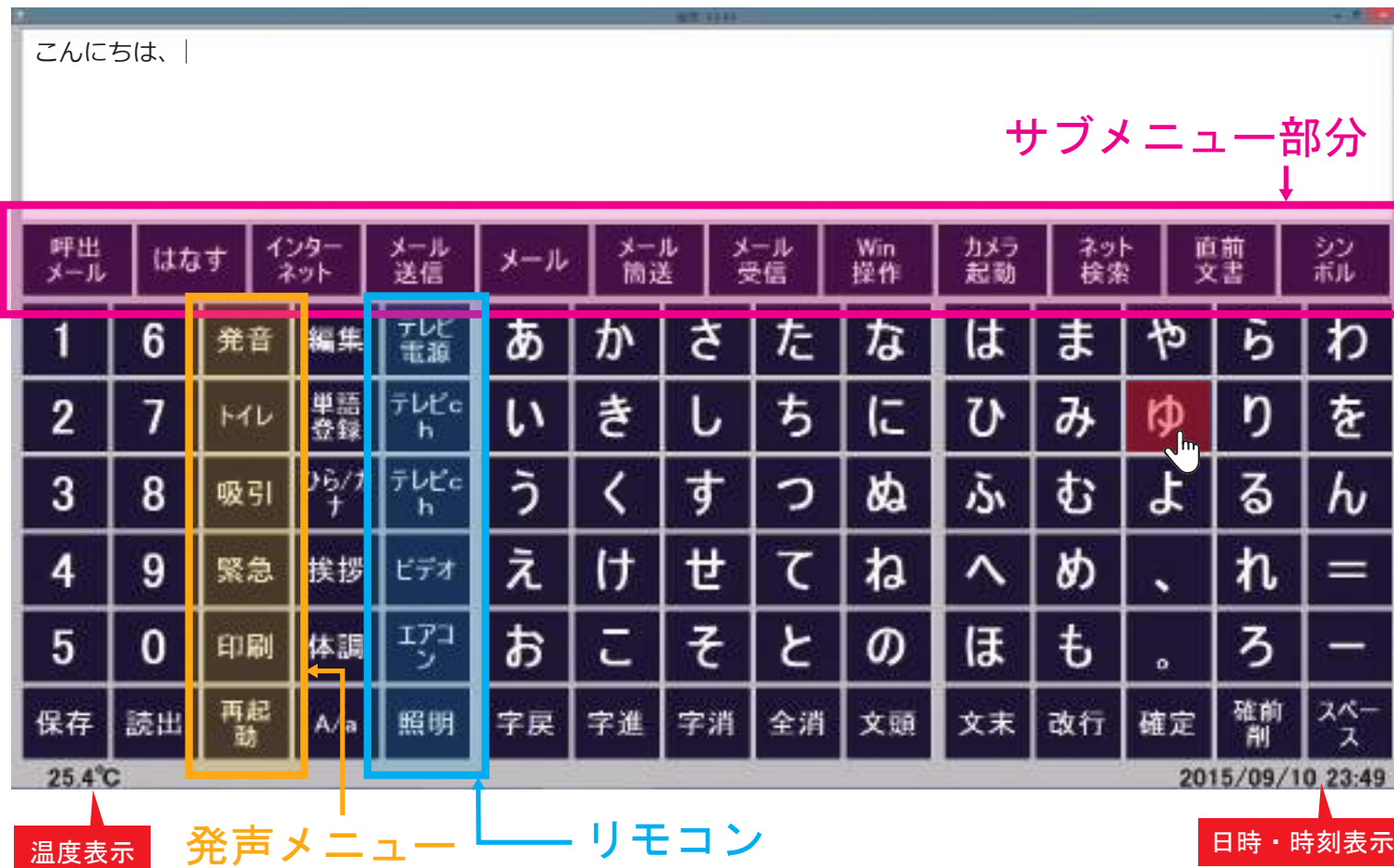

基本操作・設定

カスタマイズが可能

文字盤、画面の色、スキャン速度、マウス動作等のカスタマイズができるので患者さんにあわせた文字盤、環境を作っていただくことができます。

また、メール設定をはじめ、各種の定型文など、ほとんどの設定を、患者さんみずから、わんくりマウスを使って変更することができます。

文字盤カスタマイズ例



スイッチで操作する 簡単操作のマウス (わんくりマウス)

スキャンで動作し、クリック、貼り付けなどのマウス機能を、色、文字、イラストでわかりやすく表示しました。

マウスが停止位置を行き過ぎて逆方向へ戻る時、半分の速度で移動するので、マウスを正確な位置に停止させる事ができます。

表示例



話想で出来ること

呼び出しメール

ブザー音が届かないところにいる介助者の携帯電話へ、2クリックでメールを送れます。

はなす

登録した語句がメニューに表示され、文書入力中でも、入力されることなく発音ができます。

インターネット、ネット検索

ネットサーフィンを楽しむことができます。google、yahoo、youtube 等の設定した検索エンジンを使って検索をすることができます。

メール

3種類の方法でメールを送受信します。登録されたアドレスや語句を使い送信できる簡易設定もできます。

カメラ起動

ライブ映像が見られます。1mのコードが付いたカメラを使用し、簡単操作で「話想」画面でライブ映像を見ることが出来ます。たとえばベッドにいて玄関の来客の様子や庭の花木の様子を見ることが出来ます。



リモコン機能

エアコン、テレビ、照明などの操作が可能です。赤外線を用いた国内ほとんどの製品に対応しています。



発声メニュー

登録されている言葉を簡単な操作で発声します。単語は登録変更可能です。

オプション

赤外線ベッドコントローラー

話想からベッドのコントロールをすることができます。角度センサーにより異常動作を防止します。



【対応ベッド】

パラマウントベッド(楽匠S、楽匠Z)
シーホネス(カメリア)
その他のベッドの場合はお問い合わせください

無線コントローラーで 配線スッキリ

スイッチコントローラーと、話想の間を無線でつなぎます。見た目がスッキリするだけでなく、ご家族・介護者も動きやすくなります。
(電池交換及び、赤外線を遮らない配慮が必要です)

